

**Dienst**

Centrum Medische Genetica Gent (CMGG)

**Identificatienummer**

CMG-H9.1-OP1

**Versienummer**

7

**In voege op**

17-08-2023

**Titel**

H9.1-OP1 Instructies voor afname wangcellen (NI + Eng)

**H9.1-OP1****Instructies voor afname wangcellen (NI + Eng)****Sleutelwoorden:** pre-analyse, afname wangcellen, brush, wangborsteltje, instructies, humaan staal, website**leesgroep:** KLINIEK, DIAGN-SUPERVIS, ADM-ALG, KWAL

	<b>Naam</b>	<b>Datum</b>
auteur	Van der Cruyssen Greta	26-07-2023
nazichter	Poelman Katia	27-07-2023
machtiger	Claes Kathleen	17-08-2023

**Wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave (uitgave 6)**

- kleine aanpassing van opmaak
- telefoonnummer secretariaat aangepast (09 332 24 77 i.p.v. 09 332 36 03)
- adres website aangepast: https i.p.v. http
- kleine aanpassingen van Engelse vertaling



**Dienst**

Centrum Medische Genetica Gent (CMGG)

**Identificatienummer**

CMG-H9.1-OP1

**Versienummer**

7

**In voege op**

17-08-2023

**Titel**

H9.1-OP1 Instructies voor afname wangcellen (NI + Eng)

## INSTRUCTIES VOOR DE AFNAME VAN WANGCELLEN VOOR GENETISCH ONDERZOEK

In onderstaande tekst wordt het woord "borsteltje" gebruikt, maar dezelfde procedure geldt voor een afname met een "swab" (lijkt op een grote wattenstaaf).

Noteer uw **naam, voornaam** en **geboortedatum**, eventueel andere gegevens op de huls van het borsteltje.

Het is belangrijk dat **geen voedselresten** in de mond aanwezig zijn.

**Drink geen melk en gebruik geen kauwgom in het uur voorafgaand aan de staalafname.**

**Spoel** voorzichtig de mond met wat water, gedurende enkele seconden.

Wrijf het borsteltje gedurende **15 tot 20 seconden** krachtig tegen de binnenkant van **één wang** (controleer eventueel de tijd).

Wrijf hetzelfde borsteltje **15 tot 20 seconden** tegen de binnenkant van de **andere wang**.

Door deze handeling worden wangcellen (buccale cellen) losgemaakt en blijven deze cellen aan het borsteltje kleven.

Stop het borsteltje in de correcte beschermhuls - zonder het ergens anders mee in contact te brengen - en bewaar op **kamertemperatuur**.

Het staal kan eventueel met de reguliere post verstuurd worden. Verstuur het **binnen de 24 uur** na de afname, liefst met prioriteit, zodat het binnen de 48 uur na de afname op het laboratorium arriveert .

Zend naar onderstaand adres:

Universitair Ziekenhuis Gent

Centrum Medische Genetica

**Ingang 34 (Medisch Onderzoeksgebouw) - Stalen Medische Genetica**

Corneel Heymanslaan 10

B-9000 Gent

Voor verdere inlichtingen kan u terecht op het secretariaat (+32-(0)9-332 24 77) of op onze website (<https://www.cmgg.be>)

**Dienst**

Centrum Medische Genetica Gent (CMGG)

**Identificatienummer**

CMG-H9.1-OP1

**Versienummer**

7

**In voege op**

17-08-2023

**Titel**

H9.1-OP1 Instructies voor afname wangcellen (NI + Eng)

**INSTRUCTIONS FOR COLLECTION of BUCCAL CELLS  
(WITH MOUTH BRUSH or SWAB) FOR GENETIC TESTS**

Label the clean, sterile container with your **NAME (last name and first name)** and **DATE of BIRTH**.

It is important that the mouth is **free of food particles**.

**Do not drink milk and do not use chewing gum in the hour before the collection of the sample.**

Please gently rinse your mouth with some water, for a few seconds only, and spit it out.

Take the brush (swab) from the sterile container.

Rub **firmly for 15-20 seconds** along the inside of **one cheek** .

Repeat the rubbing for the **other cheek** .

Carefully (do not touch anything else) place the brush (swab) back into the container and keep at **room temperature**.

The brush (swab) can be sent by regular mail (priority stamp). It should arrive in the laboratory within 48 hours following the collection of the cells.

Send to:

*Universitair Ziekenhuis Gent*

*Centrum Medische Genetica*

**Ingang 34 (Medisch Onderzoekgebouw) - Stalen Medische Genetica**

*Corneel Heymanslaan 10*

*B-9000 Gent*

For further questions please contact us by phone (+32-(0)9-332 24 77) or visit our website

(<https://www.cmgg.be>)